

# TERMO DE GARANTIA

Este andador reverso está garantido contra defeitos de fabricação, por 90 dias a contar da data da compra.

A garantia só terá validade com identificação do vendedor, assim como da data de compra.

## Não estão cobertos pela garantia:

- Desgaste natural devido ao tempo ou modo de utilização;
- Equipamento que tenha sofrido qualquer alteração na sua estrutura original;
- Equipamento que tenha sofrido acoplamento de peças ou acessórios incompatíveis;
- Inobservância das instruções contidas neste manual;
- Danos causados ao objeto decorrente de traumas acidentais, ações de terceiros, ou desastres naturais;
- Danos causados por uso indevido.

Número de  
Série

Data de  
Compra

Vendedor

\_\_\_\_\_

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_

## Responsável Técnico

CREFITO: 3/150040-F

SORRI-BAURU

Av. Nações Unidas, 53-40 - Bauru - SP

CNPJ: 47.641.907/0001-01

I.E. 209.053.289-118

Fone/fax:(14) 4009-1000

vendas@sorribauru.com.br



SORRI-BAURU

# ANDADOR REVERSO

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MANUTENÇÃO TERMO DE GARANTIA




# SORRI-BAURU

Parabéns! Você acaba de adquirir  
um produto fabricado por quem  
entende e está comprometido  
com a sua satisfação!

# IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Identificação	Peso máximo do usuário	Altura manopla*	
		de (cm)	até (cm)
Infantil Micro	20kg	45	55
Infantil Pequeno	25kg	50	60
Infantil Médio	35kg	55	65
Infantil Grande	50kg	60	70
Juvenil Pequeno	65kg	65	75
Juvenil Médio	75kg	70	80
Juvenil Grande	85kg	75	85

\*Altura entre o solo e o trocanter do usuário

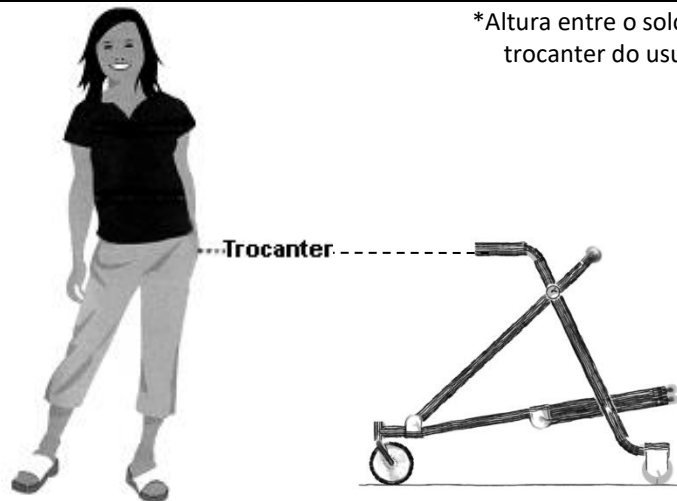

O andador reverso da SORRI-BAURU é confeccionado em diversas medidas para melhor se adequar às necessidades do usuário. O modelo deve ser escolhido de acordo com a altura do trocanter do usuário, ou conforme indicação do médico responsável.

# UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

O modelo padrão do Andador Reverso da SORRI foi projetado para uso no treino da marcha, nos ambientes típicos de clínica, hospital ou de casa. Para uso extenso na rua, ou em ambientes mais exigentes, solicite um modelo com as rodas opcionais, reforçadas.

# MANUTENÇÃO

- Limpar periodicamente a estrutura com pano úmido e macio. Se necessário, utilizar sabão neutro. Secar e lubrificar as articulações e eixos com uma gota de óleo de máquina;
- Verificar periodicamente o ajuste correto da altura e ângulo das manoplas, bem como o bom funcionamento das rodas;
- Não deixar acumular sujeiras nos rolamentos e articulações. Fios de cabelo, pequenos barbantes ou fios em geral podem enroscar nas rodas, prejudicando o movimento. Material abrasivo como areia pode causar desgaste nos componentes. Por isso, remova toda sujeira antes de reutilizar o andador.
- Não molhar os componentes de espuma. Caso isso ocorra, seque-os antes de reutilizar.